

ミムロ オーガニック ワンタッチベルト ロング

皮膚と装具の密着性を高め
 面板が密着しにくい方や外出時に最適です。

【商品説明】



解説動画




【装着方法】



特長


- ・タブの付いているパウチであればどの装具メーカーにも対応
- ・両側から面ファスナーで簡単にサイズ調整が可能
- ・両側からサイズ調整ができるため左右の張力が均一になる
- ・フリーサイズで伸縮性があり、固定するため安心感が得られる
- ・肌面がオーガニックコットンを使用したタオル地（*パイル織り）のため肌あたりが優しい
- ・マジックの開閉部分につまみがあるため楽に開閉できる

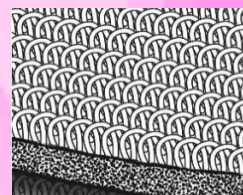


*パイル織り

装着方法

- ①クリップの根元の部分のみを左手で持ち右手でクリップの頭を下に押しします。

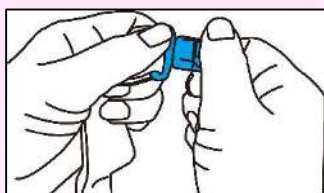


- ②右手で下に押しますと図のように根元で折れた状態になります。

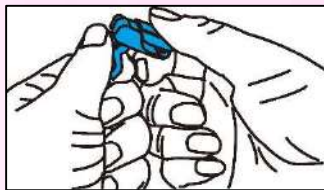

- ③右手を放すと鰐ぐちが開きます。




- ④タブの穴に鰐ぐち部分を合わせて上下から押えこんで下さい。引っ張って外れないか確認して下さい。

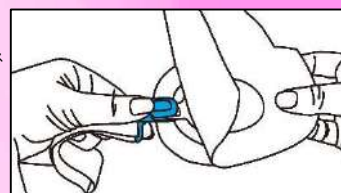

【ベルト調整】

- ⑤閉じた状態のクリップを持ちもう一方の手でベルトを胴周りに合わせて調整して下さい。

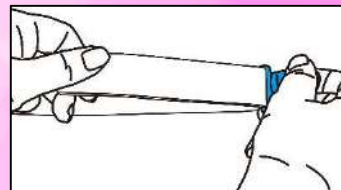

【洗濯方法】

- ・液温は40℃を限度とし、手洗い(押し洗い)をして下さい。
- ・塩素系及び酸素系漂白剤、アイロンの使用は避けて下さい。
- ・洗濯後の乾燥は、陰干しにして下さい。

【使用上の注意】

- ・ご使用中、圧迫により気分が悪くなったときなどは速やかに使用を中止し、医師または看護師にご相談下さい。
- ・ご使用中またはご使用後に発疹、かゆみ、痛み、うっ血などの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師、看護師にご相談下さい。

| 品番 | 仕様 | ベルト幅 | ベルト長さ | カラー | 品質 | 価格 |
|---------|----|------|-------|------|-------------------------------------|------------|
| OG307BL | | 3 cm | 125cm | ベージュ | 綿（オーガニック）・ナイロン ポリエステルレーヨン・ポリウレタン | 1,540円(税込) |



4 580454 854146

製造元



株式会社

ミムロ



販売代理店

〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波1-13-16
 TEL 043-307-5020 FAX 043-307-5028
<https://www.stoma-belt.jp/> E-mail: info@mimuro.jp